

遺伝子検査キットご利用ガイド

医療機関長 殿

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼を申し上げます。

さて、このたびは、弊社サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。下記の遺伝子検査キットおよび資料をご送付申し上げます。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。 敬具

キット内容 本日お送りした④綿棒の消費期限は 年 月です。

●患者キット




●検体送付キット



- ① 解析発注書⑤⑤のバーコードIDと同じシールをクリップで止めています。
- ② 遺伝子検査同意説明文書 [1枚]
- ③ 遺伝子検査同意書兼申込書 [2枚綴り] ※バーコード貼付済
- ④ 綿棒 [1本]
- ⑤ チューブ (赤いふたの入れ物) [1本] ※バーコード貼付済

- ⑥ 遺伝子検査発注書
- ⑦ 検体送付キット (透明チャック袋が入っています)
- ⑧ 着払い伝票

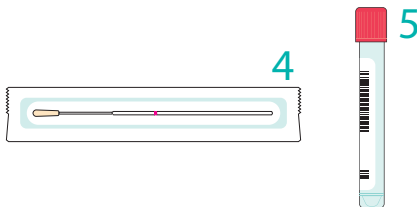

●綿棒たて



●物品注文書



注意点

- 採取前の30分間の飲食は控えてください
- 口を水でよくすすいでください (3回程度が目安)



1


同意説明と同意取得→ご記入

受診者様に②の書類をお渡し頂き、③の同意書兼申込書に必要事項をご記入いただきます。
※同意書の2枚目「受診者様控」は受診者様にお渡しください。

2

綿棒を取り出す


受診者様ご自身で開封口 (PEEL HERE) よりフィルムをはがして、綿棒を取り出してください。
このとき、綿球部分は手や他のものに触れないようにご注意ください。

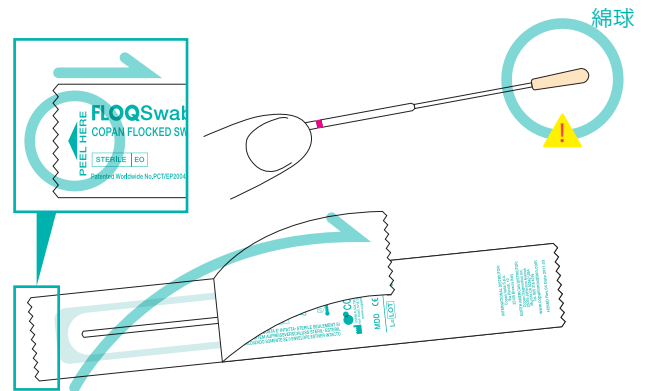

3

試料採取する

綿球部分を触らないように、「ほほ」の内側に強く押し当て
「ほほ」の内側の細胞をしっかりと綿球全体に採取します。
左右のほほをそれぞれ10回程度、回転させてこするように
口腔粘膜を採取してください。

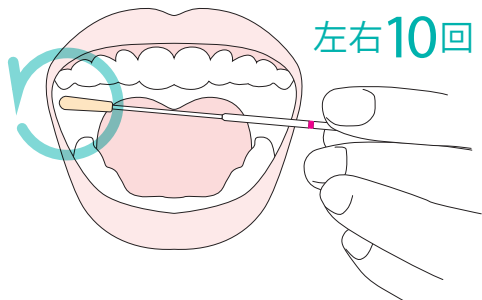


試料採取が終わったお客様より 同意書兼申込書、綿棒、赤いふたのチューブを受け取ってください。

A

綿棒を乾かす


綿球部分が何かに触れないように
お届けしている〔綿棒たて〕を使って
室温で30分ほど放置し、自然乾燥
させてください。

▶ しっかりと乾燥することが大切です。
環境によっては少し長めに乾燥さ
せてください。

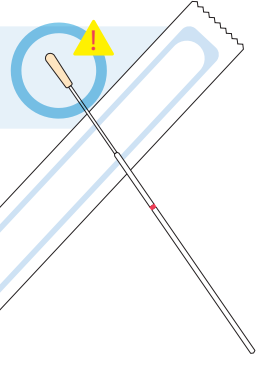

注意点


● 綿球部分は手や他のものに触れないように
注意をしてください

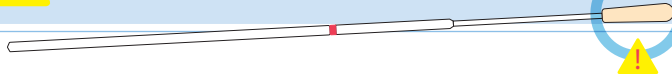

B

綿棒をチューブに移す

綿棒をチューブに入れた状態で、
柄につけられた赤線部分を容器の縁に合わせて折り、しっかりと赤いふたをしてください。

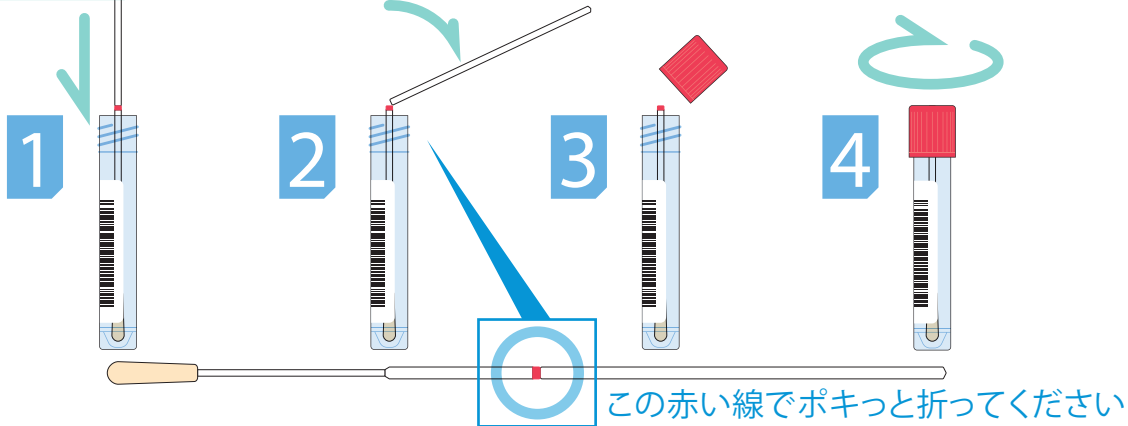

C

サインポストに同意書兼申込書をFAXする

①解析発注書・③遺伝子検査同意書兼申込書を弊社までFAXしてください。

D

サインポストに検体を送る (冷凍便)


(①にクリップで止めている)バーコードIDを貼付し、採取日をご記入いただいた⑥遺伝子検査発注書、
専用透明袋に入れた検体を輸送箱に入れてサインポストに冷凍便で送付してください。

到着確認後、サインポストより受領FAXを送信します。


発送について

採取された検体は、サイン
ポストへ月曜日午前中着
で、まとめて発送いた
だきますようお願い致
します。


⑥遺伝子検査発注書

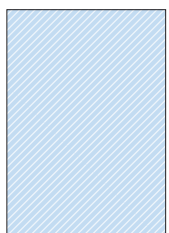

※発注書は透明袋に
入れないでください。

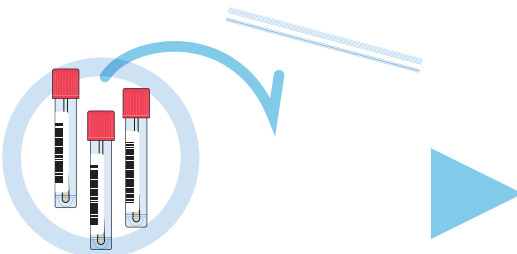

透明袋

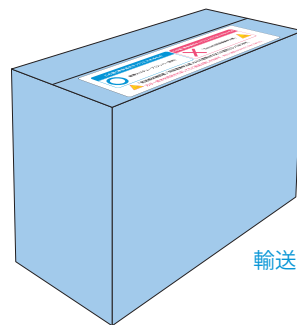

輸送箱

結果は、約1ヶ月～1ヶ月半で受診者様用・医療機関保管用の2部を医療機関宛に送付させていただきます。